

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Бахіли одноразові поліетиленові Medicom®

Артикули: 8025, 8026, 8027

Призначення та обмеження застосування

Бахіли одноразові поліетиленові Medicom® призначені для використання як захисні чохла на взуття з метою підтримання гігієни та чистоти в приміщеннях, де встановлені додаткові вимоги до чистоти.

Можуть застосовуватися в лікувально-профілактичних установах, лабораторіях, на підприємствах харчової та іншої промисловості, у салонах краси та інших приміщеннях, де необхідне підтримання чистоти.

Бахіли призначені для одноразового використання

Спосіб застосування

1. Відкрити упаковку.
2. Вийняти необхідну кількість бахіл.
3. Розгорнути бахіли та надягнути на взуття таким чином, щоб поверхня взуття була повністю закрита.
4. Перед використанням переконатися у відсутності пошкоджень виробу.

Зняття

Обережно зняти бахіли, не торкаючись зовнішньої поверхні, та утилізувати.

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Матеріал	текстурований поліетилен СРЕ
Колір	блакитний
Вага 8025/ 8026/ 8027	1,5 г/ 2,5 г/ 3,8 г
Довжина	36 ± 1 см
Висота	15 ± 1 см
Тип виробу	одноразового використання, нестерильні
Вміст латексу	не містять
Скловолокно	не містять
Пакування	100 шт. у поліетиленовому пакеті, 20 пакетів у коробі

Попередження та обмеження

- Не використовувати пошкоджені бахіли або бахіли з пошкодженою упаковкою.
- Не використовувати після закінчення строку придатності.
- Бахіли призначені виключно для одноразового використання.

- Не підлягають очищенню, пранню, повторному використанню або дезінфекції.
- Не використовувати поблизу відкритого вогню та джерел надмірного тепла.
- Виріб не призначений для захисту від небезпечних хімічних речовин або біологічних агентів.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, чистому, добре вентиляваному місці, захищеному від прямих сонячних променів.

Температура зберігання: від 5°C до 40°C.

Не допускати пошкодження упаковки під час зберігання та транспортування.

Строк придатності

5 років від дати виготовлення.

Утилізація

Після одноразового використання утилізувати відповідно до встановлених вимог та правил поводження з відходами, що діють за місцем використання виробу.

Значення маркування

LOT — номер партії. Дата виготовлення — дата виготовлення виробу. Використати до — кінцева дата використання виробу.

Знак відповідності технічним регламентам — свідчить про відповідність виробу вимогам застосовного технічного регламенту після проходження відповідної процедури оцінки відповідності.

Не містить латексу — виріб не містить латексу.

Берегти від сонячного проміння — виріб необхідно зберігати захищеним від прямих сонячних променів.

Див. інструкцію із застосування — перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією.

Виробник

АМД Хубей Інк,

Тонґхайкоу Індустріал Парк, Сянтао Сіті, Хубей Провінце, 433000, Китайська Народна Республіка

AMD Hubei Inc., Tonghaikou Industrial Park, Xiantao City, Hubei Province, 433000, The Peoples Republic of China

Уповноважений представник

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»

вул. Серпова, 11

03115, м. Київ, Україна.

Відповідність вимогам

Виріб призначений для введення в обіг відповідно до вимог **Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771**.

Дата перегляду: 10.09.2026

Редакція: 01